

BioBulk Fill con Biodentine


Incappucciamento indiretto della polpa

Caso per gentile concessione del Dott. Subir Banerji, Londra, UK

L'incappucciamento indiretto della polpa è indicato per denti con carie molto vicine alla polpa. Questo può essere asintomatico o presentare segni o sintomi di pulpite reversibile. Biodentine presenta proprietà simili alla dentina, offrendo la possibilità di riempire la cavità in un unico incremento (BioBulk Fill) e fungendo anche da restauro provvisorio per i successivi 6 mesi al fine di controllare la vitalità della polpa prima di eseguire il restauro definitivo in composito, che si legherà a Biodentine come se fosse dentina naturale.



Carie profonda nel dente 14, dente asintomatico e senza alterazioni periapicali.

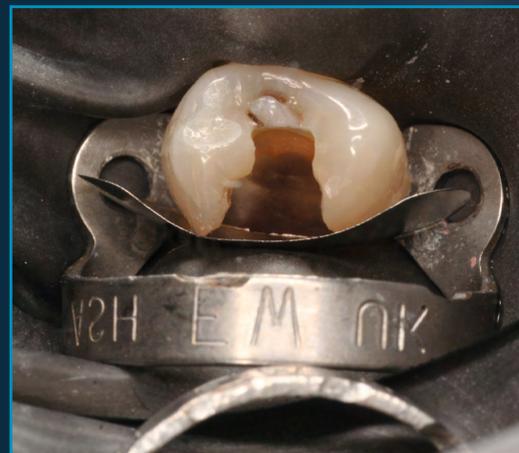

Si accede e si rimuove il tessuto cariato, lasciando una cavità profonda senza esposizione della polpa.



Biodentine viene applicato come materiale BioBulk Fill. Dopo due settimane, i primi millimetri saranno sostituiti da un composito.



Immagine clinica alla visita di follow up dopo 2 anni.



www.septodont.it