

BioBulk Fill con Biodentine


Trattamento della carie profonda

Caso per gentile concessione del Prof. Luc Martens e la Dott.ssa Rita Cauwels

Dopo l'escavazione del tessuto cariato, la polpa a volte può essere vista attraverso la trasparenza o può essere esposta. Biodentine è un materiale da restauro che può essere applicato direttamente sulla polpa e ha dimostrato di essere superiore a MTA, CaOH e formocresolo in numerose pubblicazioni, fornendo un'eccellente tenuta, facilità di manipolazione, presa rapida, proprietà antibatteriche e non crea alcuna macchia sul dente. Biodentine può essere utilizzato per il restauro BioBulk Fill senza la necessità di condizionamento preliminare o senza l'utilizzo di alcun sistema adesivo.



Paziente di 7 anni a cui è stata rimossa una carie dal primo molare inferiore destro. La cavità profonda è molto vicina alla polpa.

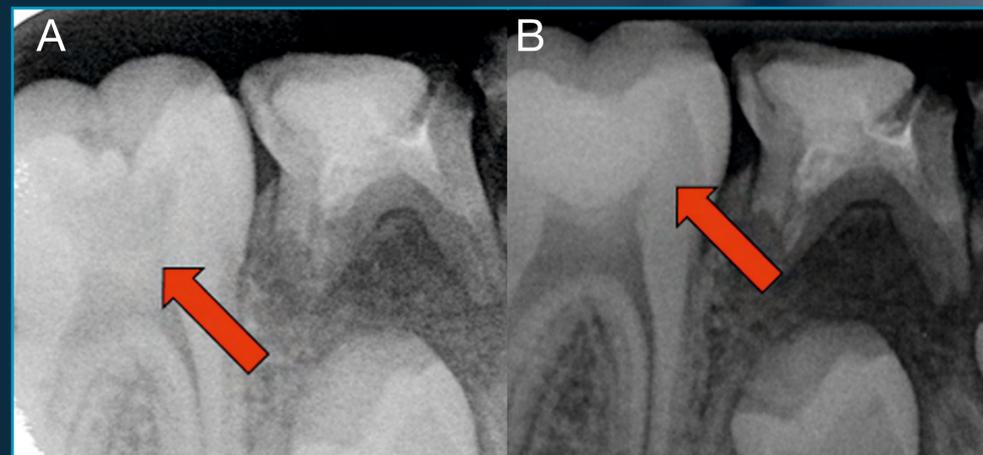

Viene eseguito un incappucciamento pulpare indiretto con Biodentine e la cavità viene riempita utilizzando una tecnica di riempimento BioBulk. Le radiografie A e B mostrano l'immagine prima e dopo il trattamento.



Radiografia dopo il trattamento.



Radiografia di follow up a 12 mesi che mostra la formazione continua delle radice.



www.septodont.es