

BioBulk Fill con Biodentine

Pulpotomia

Caso per gentile concessione della Dott.ssa Lucile Goupy, Francia

Questa indicazione include pulpotomie nei denti decidui e pulpotomie parziali nei denti permanenti. Oltre alle sue proprietà bioattive che consentono di eseguire la pulpotomia, la presa rapida di Biodentine consente il restauro immediato della corona. Allo stesso modo, può essere lasciato anche direttamente a contatto con il cavo orale, senza timore che il materiale si deteriori.



Immagine clinica iniziale del dente 55 di un paziente di 8 anni.



Durante il processo di escavazione della carie, la polpa è esposta e ciò richiede l'esecuzione di una pulpotomia cervicale (polpa vitale, nessuna infiammazione, possibile emostasi).



La cavità pulpare viene riempita con Biodentine fino alla superficie occlusale.



Un mese dopo, è stata posizionata una corona dentale pediatrica.



La radiografia di follow-up a 3 mesi mostra che non c'è nessuna lesione periradicolare.



www.septodont.it